

SISTEMA PROFESIONAL DE TERAPIA SÓNICA

Un nuevo método de terapia. Terapia Sónica.

TERAPIA SÓNICA PARA EL APARATO LOCOMOTOR Y MÁS

Un dispositivo profesional de terapia sónica para el dolor, la tensión muscular y la fascia del aparato locomotor: un tratamiento **indoloro y sin gel**, en el rango de frecuencia natural del cuerpo, que el paciente puede **sentir y oír**.



Producto sanitario con marcado CE · Fabricado en Alemania

**Consulte el perfil clínico completo al dorso.**

Mecanismo · modos · parámetros · indicaciones · software.

WF-Medical GmbH

+49 7267 2069890

www.wf-medical.de

CÓMO FUNCIONA
Mecanismo de acción
Sónico fisiológico en el rango de 10–150 Hz

Acción amplia a lo largo de la estructura

La energía sónica se propaga por hueso, tendón y fascia: un punto trata una zona amplia.


Modulación del dolor (Gate-Control)

A 100 Hz, los receptores A β inhiben la señal de dolor en la médula espinal.

Regulación del tono

30–70 Hz reducen el tono muscular en hipertonía y dolor miofascial.


Circulación y liberación de la fascia

Los micropulsos sónicos aumentan la microcirculación y liberan adherencias fasciales.

MODOS Y USO CLÍNICO
Cómo se controla
10–150 Hz continuo · 10–100 % intensidad · 2 aplicadores (dúo)

Modo dinámico

La frecuencia recorre el rango cada 10 s: alcanza la resonancia del tejido y evita la habituación.


Profundidad Soft / Deep

Soft para zonas superficiales y sensibles; Deep para músculo profundo, fascia y puntos gatillo.


Protocolo de tratamiento

10–15 min por sesión · 2× por semana · 3–6 sesiones por paciente.


Indoloro y listo para la consulta

Sin gel, cabezales desinfectables · programas predefinidos · temporizador integrado.

INDICACIONES

- Dolor miofascial y tensión muscular
- Dolor musculoesquelético crónico
- Dolor miofascial en DCM (disfunción mandibular)

OTRAS APLICACIONES · EN EVALUACIÓN CLÍNICA

- Dolor muscular post-ejercicio (DOMS) y deporte
- Espasticidad y rehabilitación neurológica
- Geriátría · prevención de caídas · movilidad
- Rehabilitación postoperatoria y ortopédica

EL SOFTWARE
Control táctil guiado e intuitivo

Ajuste intensidad, frecuencia, profundidad y tiempo

Seleccione músculos y puntos gatillo en el mapa corporal

EL SISTEMA COMPLETO

Unidad de control y dos cabezales: uno **grande** para zonas amplias y uno **pequeño** para puntos gatillo y el rostro, en un maletín profesional. Totalmente portátil, sin gel e indoloro.

PARA SU CONSULTA

Un sistema profesional que hace visible el valor de su tratamiento: capte pacientes privados y haga crecer su consulta.


CONVIÉRTASE EN DISTRIBUIDOR

Buscamos socios. Territorios protegidos · márgenes atractivos · apoyo completo de marketing y formación.